

DAX Ytdesinfektion Plus

DAX Ytdesinfektion Plus är avsedd för desinfektion av släta ytor, t.ex. undersökningsbriter, bänkar, bord etc. Exempel på användningsområden är inom hälso-, sjuk- och tandvård samt hos veterinärkliniker. Produkten är även lämplig för användning inom livsmedelshandling och barnomsorg.

Produktfakta

DAX Ytdesinfektion Plus är en färdig brukslösning som består av isopropylalkohol. Alkoholstyrkan är 45 volymprocent. DAX Ytdesinfektion Plus verkar snabbt och avdunstar utan att lämna spår efter sig på den behandlade ytan. Tillsatsen av tensid som smutslösare gör att ytan inte behöver förbehandlas. Produkten har även en god upplösande effekt på t.ex. spill av blod.

DAX Ytdesinfektion Plus uppfyller bl.a. standarden EN 13697 och har dokumenterad effekt på bakterier som *Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus* och *Enterococcus hirae*. Produkten har även dokumenterad effekt på höljeförsedda virus som Hepatit B, Hepatit C, HIV och andra virusfamiljer som tillhör orthomyxoviridae vilket inkluderar samtliga human och djur influensavirus som H5N1 och H1N1. DAX Ytdesinfektion Plus har även dokumenterad effekt på mycobakterier som *Mycobacterium terrae* och *Mycobacterium avium* samt vissa nakna virus som Adenovirus och Rota virus.

Gör så här

- Dränk in en torkduk med outspätt medel.
- Torka ytan upprepade gånger tills ytan är ren.
- Låt lufttorka.

Lagring och hållbarhet

Förvaras i rumstemperatur i väl försluten originalförpackning. Hållbarhet i obruten förpackning, se datummärkning.

Miljö

Samtliga förpackningar är återvinningsbara och avger inte några skadliga ämnen vid ev. förbränning.

Förpackningar:

- 300 ml flaska
- 1000 ml flaska
- 5000 ml dunk

