


**Artikelnummer** 216206

## Sköljvätska, Uro-Tainer Twin, vatten/ Citronsyra, Solutio R, 6 % citronsyra, 2 x 30 ml

✓ Twin – för bättre användning



### Produktbeskrivning

Uro-Tainer Twin Suby G med antingen 3,23 % eller 6 % citronsyra används för att skölja permanenta katetrar, om det finns tendens till kateterstopp eller avlagringar. Frekvens för sköljningen beror på problemets omfattning – se bruksanvisningen. Urotainer Twin-satsen består av två kamrar med 30 ml lösning vardera, så att samma sats kan användas till två sköljningar. Uro-tainer Mono består av en 100 ml enkel kammare med sköljvätska. Behandling med Uro-Tainer Twin Suby G kan kombineras med Uro-Tainer Twin Solutio R. Behandling med Uro-Tainer-lösningar ska inte ske samtidigt som behandling för cystit.



### Produktspecifikationer

Artikelbenämning	Sköljvätska
Varumärke	Uro-Tainer
Undervarumärke	Twin
Egenskaper	Solutio R, 6 % citronsyra, 2 x 30 ml
Engångs- eller flergångsanvändning	Engångs
Material	Vatten, Citronsyra
Steriliseringmetod	A
Märkningar	CE
CE-klass	Klass Is
Direktiv, förordningar och lagstiftning	93/42/EEC
På grund av produktens sammansättning är utgångsdatum baserat på produktionsdatum:	Enligt utgångsdatum
Förvaringsinstruktioner	Förvaras kallt, torrt och inte direkt solljus.
Instruktioner för produktkassering	Kan slängas med vanligt hushållsavfall.
Instruktioner för förpackningskassering	Kan återanvändas eller förbrännas.

### Bruksanvisning

Värm upp till kroppstemperatur före användning. Anslut systemet till katetern och låt innehållet rinna in på ena sidan. Stäng klämman och låt verka i 5 minuter. Följ vidare bruksanvisningen som medföljer produkten.

### Förpackning

Enhet	Innehåll	Längd	Bredd	Höjd	EAN
kartong	10 st	35.5 cm	18 cm	9 cm	4030539048903
st	1 st				



CE-märkningen är en garanti för att en produkt är säker att använda och uppfyller alla säkerhetsbestämmelser. CE står för Conformité Européenne (Europeisk Konformitet) och återfinns främst på elektronisk utrustning, säkerhetsutrustning, byggnadsprodukter och medicinsk utrustning.

 **STERILE**

Produkten är steril



Produkten är PVC-fri (PVC är en plast tillverkad av polyvinylklorid).