

Sanisoft normal

för droppinkontinens

sanicare 
your daily life



Sanisoft normal passar till personer med droppinkontinens. Sanisoft normal är ett engångsskydd som är en liten och tunn binda som absorberar en större mängd urin. Skyddet har en uppsugningsförmåga som är extra snabb och utan kanter på sidorna.




Sanisoft normal är särskilt utformad för att hålla dig torr och fräsch samt extra mjuk för användare med känslig hud. Innehåller superabsorbenter som tar bort dålig lukt. Har ett spärrskikt som förhindrar genomvättning. Limsträng på undersidan för fixering. Färgkodad releaseremsa.

Produkten är klinisk prövad.

Bruksanvisning och råd vid användning:

- Produkten fästs i trosa/ fixeringsbyxa med hjälp av klisterremsa. Avlägsna skyddsremsa och applicera skyddet.
- Var noga att välja en byxa som sluter tätt och fixerar skyddet på plats för att uppnå önskad funktion och minska risken för läckage.

Varumärke	Sanisoft
Benämning	Sanisoft normal
Sanicare art nr	3531
Antal produkter/förpackning	20 st
Antal produkter/transportförpackning	240 st
Teoretisk abs.kap ISO 11948-1 ml	214 ml
Praktisk abs.kap ISO 11948-1/3 ml	71,3 ml
Absorptionsmaterial	Fluffmassa, superabsorbenter
Ytskikt	Non-woven av polypropen
Spärrskikt	Polyeten
Mått	B 6 x L 22,5 cm
Färg på releasremsa	Vit med ljusgrå text
Kasseras	Brännbart, släng ej i toaletten.
Förvaring	Rumstemperatur
Övriga information	Produkten innehåller inte PVC, latex parfym eller hudvårdande medel. Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas vid krav på upphandling.

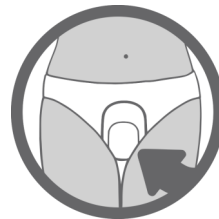

Vid sår eller infekterad hud skall skyddet bytas vid varje läckagetillfälle. Prova noggrant ut rätt storlek, för optimal funktion. Placeras ej i närheten eller i direkt kontakt med föremål och anordningar som avger eld/hög värme.

Vid allvarliga produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren samt Läkemedelsverket.



Sanicare AB
Box 260
311 23 Falkenberg



Art.nr.
3531



sanicare
your daily life

Sanicare AB, Box 260, 311 23 Falkenberg. Tel: +46 (0) 346-71 55 30, Fax: 0346-71 55 39
Email: sanicare@sanicare.se. Hemsida: www.sanicare.se